

# CERA PARA HUESOS

*Bone Wax*

**SUAVE, FÁCIL DE FORMAR Y APLICAR**

**BIOQUÍMICAMENTE INERTE**

**MÍNIMAMENTE ABSORBIBLE**



# CERA PARA HUESOS

## Bone Wax



### Descripción:

La Cera para Huesos TAGUM es una cera ósea estéril, una mezcla estéril de cera de abejas pura, parafina dura y palmitato de isopropilo, un agente suavizante de cera. La Cera para Huesos TAGUM es opaca y tiene un olor ceroso.

### Características:

- Suave, fácil de formar y aplicar.
- Suministrado estéril para un solo uso.
- Bioquímicamente inerte.
- Mínimamente absorbible.

### Esterilidad:

REQUISITO	ESTÁNDAR	RESULTADO
Esterilizado por Radiación Gamma	ISO 11137-1	Producto Estéril

Tiempo de vida útil: 5 años

### Acción:

La Cera para Huesos TAGUM logra la hemostasia local del hueso al actuar como una barrera mecánica (taponamiento). No actúa bioquímicamente y es mínimamente absorbible.

### Forma de presentación:


La Cera para Huesos TAGUM viene en una caja de cartón por 12 unidades estériles, cada unidad se encuentra contenida en una bolsa individual de Aluminio/Aluminio cubierta de papel grado médico/película de film polilaminado.

### Advertencias:

La Cera para Huesos TAGUM no debe volver a esterilizarse ni someterse a un calor excesivo. Puede inhibir la osteogénesis y puede actuar como una barrera física para el proceso reparativo. No usar si el envase está abierto o dañado. Desechar la cera para hueso abierta, no utilizada.

### Precauciones:

La Cera para Huesos TAGUM debe utilizarse con moderación. El exceso de cera para huesos debe eliminarse del sitio operativo. El empaque debe abrirse justo antes de su uso para minimizar la posibilidad de contaminación y secado excesivo.

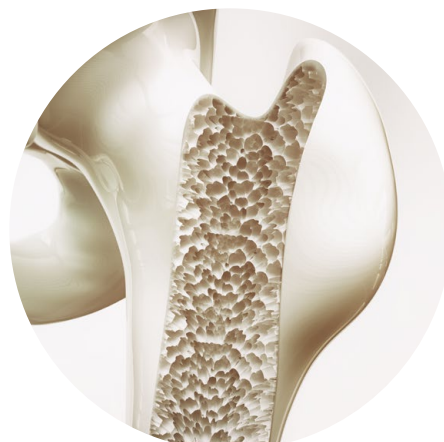

## TAGUMEDICA



WWW.TAGUMEDICA.COM

*¡Calidad en manos expertas!*

☎ (511) 336 7171

@ info@tagumedica.com

📍 Av. Maquinarias 2414 Lima 1, Perú