

El humo quirúrgico contiene más de 40 componentes tóxicos incluyendo:^{1,2}

Monóxido de carbono - Formaldehído - Cianuro de hidrógeno - Metano - Tolueno - Benceno



Simplemente conecte SeeClear al puerto lateral del trócar para filtrar toxinas nocivas. No se necesita fijarlo a la succión de la pared de quirófano.

SeeClear®

Sistema de evacuación de humo laparoscópico

Proteja a su personal de las toxinas que se encuentran en el humo quirúrgico:

- Elimina el 99.999% de las partículas de 0.1 micrones (en aerosol).³
- La membrana de carbón activado absorbe olores y toxinas químicas.³
- El flujo óptimo mantiene el neumoperitoneo.
- Mantiene un campo de visión claro.
- La configuración fácil requiere una participación mínima del personal.
- Sin fijación a la succión de la pared, funcionalidad discreta.

1. Ulmer, BC. Los peligros del humo quirúrgico. AORN Journal. 2008; 87 (4): 721-738.
2. Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Cómo el humo del tabaco causa enfermedades: la biología y la base conductual de la enfermedad atribuible al tabaquismo. Un informe del cirujano general. 2010
3. Datos en archivo.



SeeClear es efectivo, fácil de usar y discreto. Escanee. Vea. Aprenda. O visite coopersurgical.com/SeeClear



Simplemente conecte SeeClear a el puerto lateral del trócar para filtrar toxinas nocivas.

Elimina el 99,999% de partículas de 0.1 micrones (aerosolizado) ³.

No se necesita fijarlo a la succión de la pared de quirófano.

Proteja a su personal de las toxinas que se encuentran en el humo quirúrgico ...

... y mantenga una visión clara del campo quirúrgico con SeeClear!

SeeClear® es un sistema de filtro pasivo descartable de múltiples capas. El filtro ULPA atrapa el humo, partículas y agentes patógenos en aerosol, mientras que una membrana de carbón activado absorbe olores y toxinas químicas.

No se requiere bomba de vacío: SeeClear funciona en silencio, eliminando el penacho quirúrgico y proporciona una visión clara del campo quirúrgico. No se necesitan tubos adicionales: todo está incluido, lo que permite una conexión fácil al puerto lateral del trócar.

La presión intraperitoneal elevada expulsa el humo junto con el CO₂.

Los caudales están preestablecidos para optimizar la eliminación de humo sin perder el neumoperitoneo.



Fonrouge 2274, (C1440CZD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
cirugia@cirugiaargentina.com
T. +54 011 4682 0033 / 2466

www.cirugiaargentina.com

 [cirugia-argentina](https://www.linkedin.com/company/cirugia-argentina)
 [cirugiaargentina](https://www.facebook.com/cirugiaargentina)

Tres pasos fáciles para su uso



Conecte el tubo de SeeClear al puerto lateral del trócar más grande y más cercano a la fuente de humo o neblina.



Coloque la carcasa del filtro SeeClear lejos del sitio quirúrgico. Fíjelo a la cinta quirúrgica. Colóquelo a un nivel elevado sobre el trócar con el clip adjunto.

NOTA: elevar el filtro SeeClear evita la condensación originada por la recolección en la carcasa y reduce el caudal.



Deje el puerto lateral del trócar completamente abierto antes de que se cree el humo o neblina. El filtro SeeClear no es un dispositivo de recuperación.



CooperSurgical es la empresa líder dedicada a proporcionar dispositivos médicos y soluciones a procedimientos que mejoran la prestación de atención médica a las mujeres independientemente al tipo de clínica. Nuestra compañía está fomentando esa posición a través de la expansión de sus negocios centrales e introducción de productos basados en tecnología avanzada que ayudan a los médicos en el manejo y tratamiento de condiciones comúnmente vistas.

Para más información, llámé al 800.243.2974 o al 203.601.5200 o visite www.coopersurgical.com. Además, nos vemos en YouTube en www.YouTube.com/CooperSurgical.

800.243.2974 | 203.601.5200 | www.coopersurgical.com

95 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611